

Enhance
Sistema para acabado y pulido



USO

Sistema de acabado y pulido de restauraciones a dos pasos

ESPECIFICACIONES

Puntas abrasivas de resina y óxido de aluminio en mandril plástico.
Presentación en copas, discos y puntas.
Viene con dos pastas diamantadas (Prisma Gloss y ultra fina).
Copa de caucho con mandril para una suave aplicación de las pastas.

COMPOSICIÓN

Resina de dimetacrilato de uretano polimerizada
Óxido de Aluminio
Dioxido de silice

PRECAUCIONES

Este producto está fabricado para usarse según lo explicado específicamente en las instrucciones de uso. El uso indebido de este producto respecto a lo descrito en las instrucciones de uso será bajo criterio y única responsabilidad del profesional que lo utilice. Si el instrumento de acabado se utiliza ejerciendo presión lateral excesiva podría salirse del mandril o causar un deterioro rápido y la reducción de su efectividad. Esta presión excesiva podría provocar ranuras en las superficies de la restauración. Utilice este producto en una zona bien ventilada. Evite la inhalación de partículas suspendidas en el aire. Proteja las restauraciones adyacentes de contactos accidentales con discos, copas o puntas giratorias.

CONTRAINDICACIONES

No reutilizar. Los discos, copas y puntas de acabado Enhance, son artículos desechables de un solo uso. Todo intento de esterilizar estos artículos afectará negativamente el rendimiento. Los discos, copas y puntas de acabado Enhance no deben usarse con piezas de mano de alta velocidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO

Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco. Guarde los discos, copas y puntas de acabado Enhance a temperaturas de entre 18 °C y 25 °C (65°F – 80°F) y a una humedad relativa de 50 % +/- 20 %. Evite exponerlos a la luz solar. No utilice pasada la fecha de caducidad.

PRESENTACIÓN

Kit 40 Unidades (20 discos , 10 copas , 10 puntas)
25 copas de pulido
1 mandril
1 Jeringa de Prisma Gloss de 4 g
1 Jeringa de Prisma Gloss Extra Fine de 4 g

Repuesto

Paquete x 6 cajas x 30 unidades
Cajas con 30 puntas en forma de copa , disco , puntas y caja surtida .
Cajas con 7 puntas en forma de copa, puntas y caja surtida.

FECHA VENCIMIENTO
MARCA: Enhance Dentsply Caulk
REGISTRO INVIMA Y/O CERTIFICACIÓN DE QUE NO LO REQUIERE 2007DM-0000922
FECHA DE VENCIMIENTO REGISTRO 06/09/2017
ORIGEN DE FABRICACIÓN DEL BIEN Brasil
PRESENTA CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma Responsable